



Инструкция по эксплуатации

XS 301

Описание

Средства реабилитации для инвалидов: ходунки Ortonica XR 301 (далее по Руководству - ходунки) - приспособление для передвижения людей, в том числе детей, с нарушением опорно-двигательной системы в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

Ходунки изготовлены из металла, имеют высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Мягкие накладки на поручнях обеспечивают прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате. Высота ходунков регулируется в шести положениях в зависимости от роста пользователя.

Конструкция ходунков предусматривает два положения: шагающее, нешагающее.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования, не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

Показания

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы.
- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.

- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы — ходунки могут опрокинуться.
- Не ходите по мокрому или скользкому полу.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати.
- Нельзя использовать ходунки при головокружении.
- Нельзя подходить слишком близко или вплотную к ходункам к ходункам.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги.

Технические параметры

Параметры	XS 301
Габариты (ДхШхВ), (± 1 см)	70,5x61x83-96
Ширина между ручками, (± 1 см)	48
Высота до сиденья, (± 1 см)	52
Диаметр колес (передние/ задние), (± 1 см)	25/20

Грузоподъемность, (± 5%), кг	100
Масса (нетто), (± 5%), кг	2,2
Габариты упаковки, (ДхШхВ) (± 1см)	55х30х69
Количество штук в упаковке	1

**Данные размеры приведены справочно и могут быть изменены без согласования с потребителем. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инвалидной коляски, не ухудшающие ее потребительских свойств.*

Подготовка к эксплуатации

1. Раздвиньте раму.
2. Выберите положения: шагающее, нешагающее, отрегулируйте высоту ножек.

Очистка

Производите дезинфекцию ходунков в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности ходунков протираются дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

Правила хранения и транспортировки

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода-изготовителя не гарантирует их сохранность. Повреждения, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации. Утилизация ходунков осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

Комплектация

- Ходунки 1 шт.;
- Руководство 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции ходунков, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Сведения о сертификации

Средство реабилитации для инвалидов, ходунки Ortonica XR 104, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717

Производитель: «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай

Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Dali, Nanhai District, 528234 Foshan, Guangdong, China

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.
На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Сервисное обслуживание изделий производится в ООО "Реамед".

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, д. 42

Контактный телефон: 8 (473) 300-31-91; 300-31-51

Дата продажи	Подпись продавца / Поставщика



8 800 500-14-14

ortonica.ru